


# CIANA MASSAGE TABLE

## ポータブルテーブル・ウェイヤーヘディ

- ご使用前に**
- 本製品は、軽度なマッサージでの使用を目的として設計された簡易型ポータブルベッドです。乱暴な使用は避け、お取り扱いには十分ご注意ください。
  - 商品の改良等により、色や仕様が変更され、写真と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

### 本体の組み立て

1. 「取っ手」を上にしてベッドを立て、側面2ヶ所の留め金具を外します。
  2. 2つ折りになっているベッドの本体を開きながら同時に脚を広げます（写真1）。
- ※ワイヤーが絡んでいないかを必ず確認してください。**  
 【\*この状態の時に、必要に応じて脚の高さを調節できます】
3. 脚が完全に広がったことを確認してからベッドを起こし、ワイヤーがピンと張るように支柱脚を真っすぐ伸ばします。
  4. フェイスレストセット（写真2）、アームレスト（写真3）は用途に合わせて取り付けてご使用ください（写真2）。

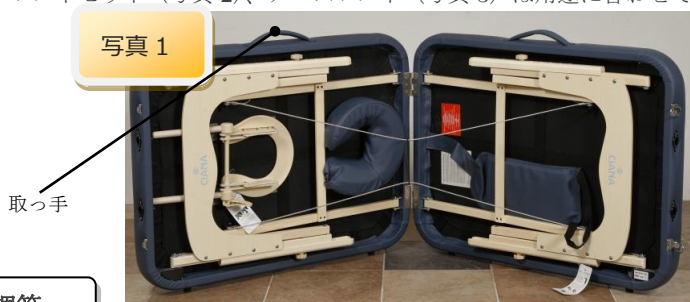

### 高さの調節

1. 取っ手を上にして、ベッドを横に倒します。
2. ベッドの脚部は、本体(架台)に付属する脚と高さを調節する脚があり、これらを固定する「固定ノブ」が付いています。
3. この固定ノブ4か所を外して高さを調節する脚を本体付属脚から外し、調節脚にある穴の位置を差し替えることにより、高さを調節します。

**※固定ノブがしっかりと締まっていること、4本の脚は、必ず同じ高さで固定し、水平に設置されていることを確認してください。**

4. 脚が完全に広がったことを確認してからベッドを起こし、ワイヤーがピンと張るように支柱脚を真っすぐ伸ばします。

### 折りたたみ方法

1. 取っ手を上にしてベッドを横に倒します。
  2. 支柱脚と脚をゆっくり折りたたみ、ベッド本体を折りたたみます。
- ※折りたたむ際、ワイヤーが挟まっていたり、接続部分で折れていないかを確認してください。**
3. フェイスレストセットを外し、ベッド裏面に取り付けます。
  4. 側面2ヶ所の金具を留めて固定します。

○サイズ： 巾 71 cm X 長 184 cm(フェイスレスト装着時 211 cm) X 高 59.5~82 cm

○カラー：アガートブルー

○レッグエクステンション：8ホール（8段階調節）

○重量：約 12.5 kg

○荷重量：動的荷重 204 kg、静的荷重 1250kg

○素材：脚部/ブナ材

レザー部/ポリウレタン

クッション部/ウレタン

○ワイヤー：長短セット型

○留め：金具

○付属品：タイヤ付キャリングバッグ



### 注意！警告！（ベッドの破損、ケガや重大事故の恐れがあります）

- ※組み立て時や収納時に指を挟まないようご注意ください。
- ※偏った負荷をかけたり、ベッドに2人乗った状態等で急激な圧力を掛けた場合、破損や転倒する恐れがありますので行わないでください。
- ※ご使用前に、各種ビスが締まっていること、ワイヤーが絡んでいないことを必ず確認し、不具合等があった場合は使用を中止してください。
- ※落下防止柵がついておりません。落下や転倒の危険性がありますので、患者さんから目を離さないようにしてください。